

## novofine® Autocover® 30G

0,3x8 mm

### Introduction

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser NovoFine® Autocover®, même si vous avez déjà utilisé les aiguilles NovoFine®.

N'utilisez pas l'aiguille sans une formation appropriée de votre professionnel de santé.


NovoFine® Autocover® est une aiguille d'injection stérile avec un système de verrouillage de sécurité automatique qui réduit le risque de piqûres accidentelles. L'embout sur NovoFine® Autocover® dissimule l'aiguille de la vue pendant l'utilisation. Le système de verrouillage de sécurité indique que l'aiguille a été utilisée. L'aiguille est stérile si la languette en papier et le capuchon de l'aiguille sont intacts. Les aiguilles sont à USAGE UNIQUE.

Nous déconseillons aux personnes aveugles ou malvoyantes d'utiliser NovoFine® Autocover® sans l'aide d'une personne voyante formée à l'usage de cette aiguille.

### ⚠ Information importante


Portez une attention particulière à ces informations, car elles sont importantes pour une utilisation sécuritaire de l'aiguille.

⚠ Conservez les petits éléments hors de la portée des enfants.

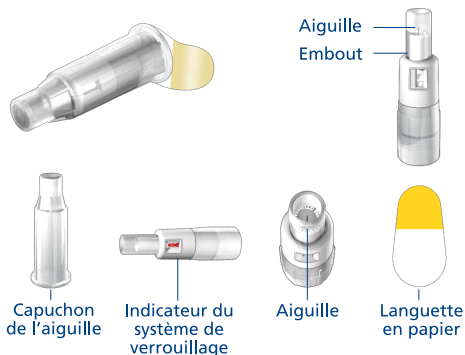


### 1 Fixation de NovoFine® Autocover®

- Prenez une aiguille NovoFine® Autocover® neuve.
- Vérifiez que la languette en papier et le capuchon de l'aiguille sont intacts pour garantir la stérilité. S'ils sont endommagés, utilisez une aiguille NovoFine® Autocover® neuve.
- Retirez la languette en papier.
- Insérez l'aiguille de manière bien droite sur le stylo. Vissez jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.

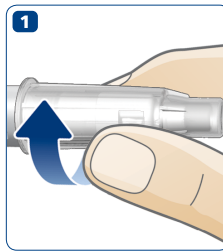

### 2 Retrait du capuchon de l'aiguille

- Retirez le capuchon de l'aiguille et conservez-le.

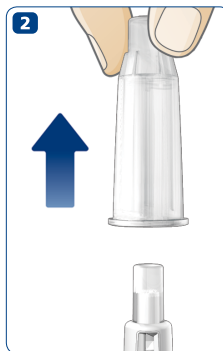

### 3 Contrôle de l'écoulement (purge)


Vérifiez l'écoulement dans le système d'administration. Cela permet de vous assurer que vous recevrez la totalité de votre dose. Suivez la procédure décrite dans la notice d'utilisation qui accompagne le système d'administration.



⚠ Avant l'injection, assurez-vous que l'aiguille n'est pas bloquée : Si l'indicateur du système de verrouillage est rouge, l'aiguille est verrouillée et ne peut pas être utilisée (voir étape 5). Retirez l'aiguille (voir étape 6) et vissez une aiguille neuve.

### 4 Réalisation de l'injection


- Sélectionnez la dose dont vous avez besoin selon les instructions de la notice qui accompagnent le système d'administration.
- Insérez l'aiguille dans la peau en respectant la méthode d'injection indiquée par votre professionnel de santé. Il est recommandé d'effectuer un pli cutané afin de rendre la surface d'injection plus ferme.
- Injectez le médicament selon les instructions de la notice qui accompagnent le système d'administration. **Maintenez NovoFine® Autocover® contre la peau** comme illustré dans le schéma 4, afin de vous assurer que l'aiguille reste totalement insérée pendant la durée de l'injection.
- Maintenez l'aiguille complètement enfoncée et **comptez lentement jusqu'à 6**. Ceci permet de vous assurer que vous injectez entièrement votre dose.
- Retirez l'aiguille de la peau. Quelques gouttelettes de médicament peuvent apparaître sur la peau. Ces gouttelettes étaient restées à l'intérieur de l'embout lors du contrôle de l'écoulement. Cela n'a aucun effet sur la dose qui vient d'être injectée.

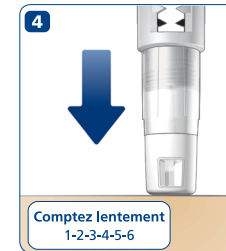

⚠ Maintenez l'aiguille complètement enfoncée pendant l'injection pour vous assurer que vous injectez entièrement votre dose. **Pour les personnes sous insuline** ; si la dose n'a pas été administrée entièrement, cela peut entraîner un taux de sucre dans le sang élevé.


### 5 Système de verrouillage

Le système de verrouillage est activé quand vous retirez l'aiguille de la peau et l'indicateur du système de verrouillage devient rouge. L'indicateur du système de verrouillage rouge vous indique que l'aiguille a été verrouillée et ne peut pas être réutilisée. L'indicateur du système de verrouillage rouge **n'est pas un indicateur** de délivrance de votre dose.

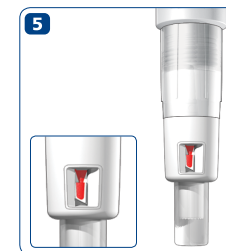

### 6 Retrait de l'aiguille

- Après l'injection, remplacez le capuchon de l'aiguille puis dévissez l'aiguille.
- Jetez l'aiguille de manière sécuritaire, selon les instructions de votre professionnel de santé.

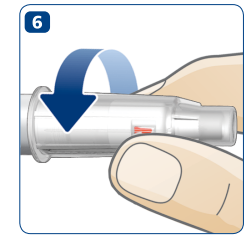

Peut être utilisé avec : FlexPen®, FlexTouch®, Innolet®, NovoPen®, NovoPen Echo®, Ozempic®, Saxenda®, Victoza®, Xultophy® (® de Novo Nordisk A/S). FlexPro®, Norditropine NordiFlex®, NordiPen® (® de Novo Nordisk Health Care AG). AutoPen®, BerliPen®, Byetta®, ClikStar®, HumaPen®, KwikPen®, SoloStar®, TactiPen® (® de leurs propriétaires respectifs).

NovoFine® et Autocover® sont des marques déposées appartenant à Novo Nordisk A/S, Danemark

Pour les patients de l'Union européenne : si votre médecin et/ou si vous pensez que vous avez eu un incident grave provoqué par l'utilisation de NovoFine® Autocover®, assurez-vous de le signaler à Novo Nordisk et à votre autorité de santé nationale.

Date de mise à jour : 2019-05

CE 0123 novonordisk.com

© 2019  
Novo Nordisk A/S

DK-2880 Bagsværd, Danemark

